
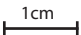


## Pupillendistanz-Messung

Und so funktioniert's!

1. Drucke dieses Blatt im Verhältnis von 100% aus. Tipp: Verwende ein stärkeres Papier.
2. Prüfe den Maßstab. Folgender Abstand sollte 1cm breit sein: 
3. Schneide die Schablone aus.

Schablone Pupillendistanz-Messer

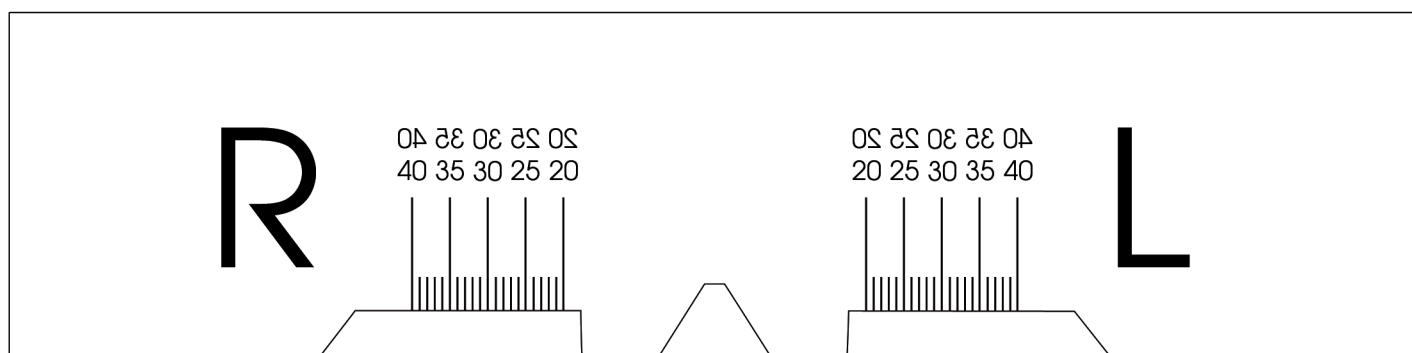

4. Setze die Schablone vor einem Spiegel an der Nasenwurzel an. Schaue gerade aus und lese die PD-Werte vertikal vom Mittelpunkt der Pupille ab.

